



# S.V.G. Smart View Glasses

## Primo utilizzo – Guida


1. Inserire nella presa di corrente il **“Wi-Fi Extender”** in dotazione e attendere circa 30 secondi.
2. Dal PC, collegarsi al **Wi-Fi** con etichetta **“SVG by DTU”** disponibile nell’elenco del sistema.
3. Eseguire il software di acquisizione del proprio PC.
4. Accendere gli *Smart Glasses* tenendo premuto il tasto **“Power button”** del controller per circa 5 secondi fino a che i led saranno verdi.

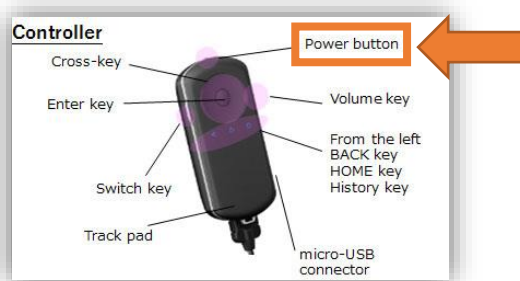


5. Indossare gli *Smart Glasses* e attendere che appaia la schermata iniziale di **SVG** come da immagine sotto. *Tempo stimato circa 30 secondi.*

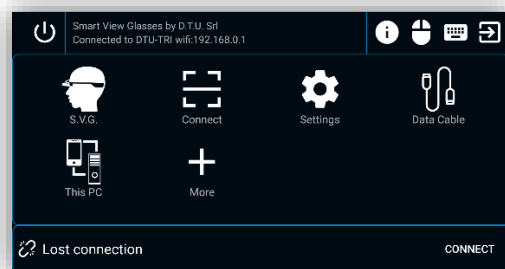


6. Tramite il “Track Pad” del “Controller” selezionare icona “Connect” come da immagine sotto:

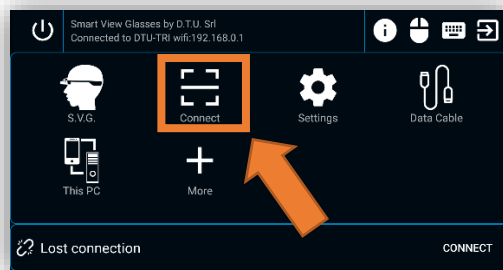

7. Eseguire l’accesso facendo “Click” sul “Client” elencato come mostra l’immagine sotto. (Es. DTU-TRI)  
**N.B.** Se non è presente nessun PC in elenco, assicurarsi che il programma “SVG Receiver” sul PC sia in esecuzione e/o gli Smart Glasses siano sia collegato con il Wi-Fi Extender.

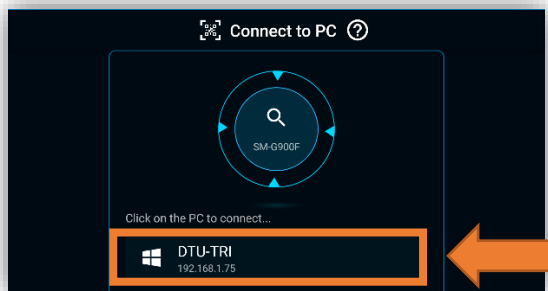

8. Una volta eseguito l’accesso al PC con il dispositivo SVG, tenere premuto per qualche secondo il tasto di “Switch Key” fino alla presenza di una vibrazione per **BLOCCARE e/o SBLOCCARE** le funzioni del “Track Pad”.

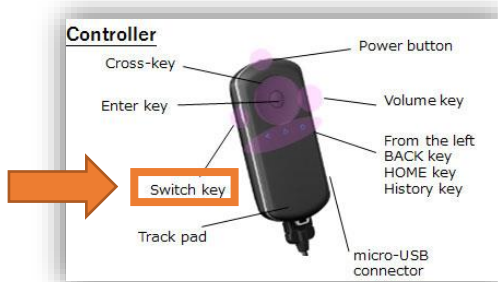

**POWER OFF** Per spegnere il dispositivo bisogna tenere premuto il tasto “Power button” del controller per circa 5 secondi e poi fare “Click” su “Spegni”.